



Polohovací pomůcky



Navrženo a vyráběno
v České republice



Splňuje MDR

Profesionální polohovací pomůcky

Účinný prostředek pro prevenci proleženin

Výzkumy a praxe ukazují, že polohování dlouhodobě ležících osob má pozitivní dopady na jejich psychický i fyzický stav. Pravidelným polohováním se zamezuje nežádoucím efektům, např. tvorbě proleženin nebo opruzenin, dochází ke snížení bolesti a zlepšení stavu osoby, což přináší pozitivní vliv na psychickou kondici ošetřovaného. To zároveň pozitivně ovlivňuje ekonomiku péče, protože provádění prevence je méně nákladné v porovnání s následným řešením vzniklých problémů.

Přímou vazbu polohování a tématu proleženin např. uvádí publikace Prevence dekubitů. „Asistované změny polohy snižující tlak na tkáň pacienta jsou pasivní polohování na lůžku a vertikalizace (posazování a postavování). Polohování je základní a nejúčinnější prostředek proti vzniku dekubitů. Jedná se o systematické, přesnými pravidly se řídící časované změny polohy.“ [MIK]

Autor publikace zdůrazňuje přínos polohování takto: „Zdá se, že pomocí polohování můžeme velmi snadno a účinně bojovat proti dekubitům. Avšak praxe je jiná. Obvykle je tomu tak, že jedna, výjimečně dvě sestry, otáčejí a přesunují pacienta zpravidla každé dvě hodiny. Tato činnost může mít na pacienta blahodárné účinky, ale je často nepříjemná pro pacienta a náročná pro ošetřující personál, zvláště tehdy, má-li pacient velkou hmotnost. U sester se často objevují vertebrogenní potíže a tělesné vyčerpání. U přetížených sester může být nezřídka výsledkem i trvalá invalidita. Tento problém není zanedbatelný, neboť se týká většiny sester, které

pracují na odděleních s pacienty dlouhodobě ležícími a imobilními. Tuto situaci lze řešit buď větším počtem personálu, což je finančně náročné nebo vybavením oddělení antidekubitními pomůckami a transportními systémy nebo kombinací obojího.“ [MIK].

V systému péče mají polohovací pomůcky své pevné místo. „Mezi velmi praktické a snadno dostupné prostředky, usnadňující práci ošetřovatelského personálu, patří bezesporu polohovací pomůcky. Dříve se tyto pomůcky vyráběly podomácku nebo na zakázku v čalounických dílnách. Nyní je na trhu snadno dostupná široká škála podložních válců, kruhů, kvádrů, korýtek, klínů a polštářů, naplněných různými materiály, které zvyšují pohodlí zapolohovaného pacienta, zabraňují nežádoucímu tlaku a snižují tak riziko vzniku dekubitu. Aby pomůcky plnily dobře svou úlohu, musí být potaženy vodovzdorným a paropropustným potahem. Vodovzdornost potahu zajišťuje snadnou omyvatelnost a zvyšuje životnost pomůcky. Propustnost látky pro molekuly páry zabraňuje pocení a vzniku vlhkosti pod pacientem.“ [MIK]

MIK - Mikula a Müllerová, 2008, Prevence dekubitů, ISBN 978-80-247-2043.

Sláva

Polohovací antidekubitní **pomůcky Sláva slouží k polohování dlouhodobě ležících osob, ale i k rehabilitačním cvičením.** Současně slouží k zamezení vzniku proleženin, ke snížení bolesti při různých zraněních a ke zlepšení celkové pohody jejich uživatele. **Jádro pomůcek je vyrobeno z PUR pěny a je opatřeno speciálním snímatelným paropropustným a voděodolným potahem Ocean.** Podložky pod paty a lokty jsou vyplněny ovčím roumem.

Viktorie

Antidekubitní pomůcky **Viktorie nacházejí výborné uplatnění při bazální stimulaci v každodenní ošetřovatelské péči.** Bazální stimulace umožňuje lidem s těžkým zdravotním nebo duševním postižením integraci do současného života s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností. **Pomůcky se skládají z potahu a náplně. Potah může být vyroben ze dvou druhů látky – látky Ocean nebo bavlny. Náplň tvoří EPS kuličky, které se při sebemenší změně tlaku pohybují. Alternativně lze pomůcky dodat s drtí z viskoelastické pěny.**

Profesionální polohovací pomůcky

34 let vývoje a praktických zkušeností

30+
let


30+ let zkušeností

Jsme nejstarší výrobce polohovacích pomůcek v Česku. 30 let našich zkušeností je obsaženo v bohaté tvarové paletě, použitých materiálech a kvalitě zpracování. V roce 1990 jsme začali vývojem a výrobou pomůcek pro polohování pacientů po operacích kloubů, následovalo rozšíření sortimentu do dalších zdravotnických oborů a do oblasti sociálních služeb.

60+
tvarů

Široký sortiment

Nabízíme dvě ucelené řady pomůcek – pomůcky **Sláva** s pěnovým jádrem a pomůcky **Viktorie** s výplní z EPS kuliček, ovčího rouna nebo drtě z viskoelastického materiálu. Naše nabídka zahrnuje více než 67 různých tvarů. **Umíme vyrobit i pomůcky na zakázku dle návrhu klienta.**

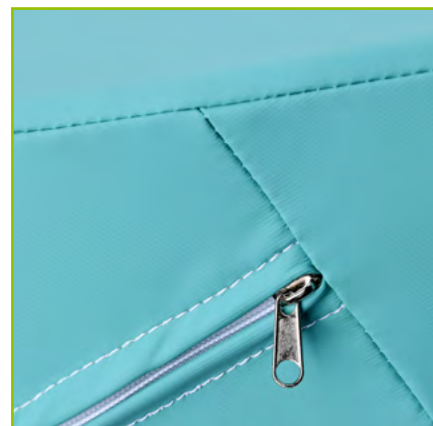

Kvalitní svrchní potah

Naše pomůcky jsou opatřeny potahem z **voděodolné a paropropustné elastické tkaniny** s dlouhou životností i v náročném prostředí nemocniční a ošetrovatelské péče, ve kterém probíhá častá dezinfekce a praní, aby byl zachován vysoký hygienický standard a bezpečnost pacienta/klienta. **Potah obsahuje látky zpomalující hoření.**

antibakteriální
úprava

Antibakteriální úprava

Sledujeme trendy ve zdravotnictví, a proto jsme zavedli **výrobu svrchních potahů z látky s antibakteriální úpravou**. Tato látka je jedním ze stavebních prvků pokročilé hygieny s **cílem minimalizovat riziko nozokomiálních nákaz**.



V souladu s MDR

V roce 2022 jsme dosáhli certifikace dle regulace MDR. Všechny naše pomůcky jsou baleny do ochranného obalu a značeny dle požadavků směrnice MDR, abychom vám usnadnili logistické procesy. Při výrobě plníme všechny regulační požadavky.



Praktické detaily


Dlouholetá praxe s výrobou pomůcek nám přinesla poznatky, které jsme opětovně vložili do jejich návrhu a výroby. Např. **zipy jsou umístěny tak, aby netlačily a jsou kryty proti zatečení. Suché zipy jsou opatřeny dodatečnou ochranou potahovým materiálem. Pomůcky řady Viktorie mají navíc vnitřní potah se zipem s ochranou proti samovolnému otevření, který umožňuje doplnění náplně.**

Profesionální polohovací pomůcky

Základní přehled poloh (1/2)


Poloha na boku

Poloha pro celkové odlehčení dorzální strany těla. Důležitá jako prevence proti dekubitům a stagnaci sekretu v dýchacích cestách. Je důležité dbát na správné napolohování spodního ramenního kloubu. Jako u všech poloh je nutné zvolit vhodné a adekvátní polohovací pomůcky, tak aby poloha klientovi poskytla pocit stability a komfortu.

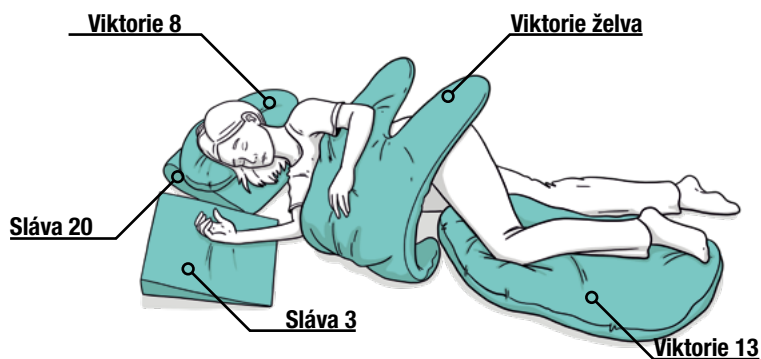


Poloha semisupinační

Poloha mezi polohou na zádech a na boku často využívaná u oběhově nestabilních osob, kdy by úplné napolohování na bok mohlo způsobit výrazné zhoršení této nestability. Proto se volí aspoň částečné odlehčení dorzální části těla. U této polohy je důležité správné uložení horních končetin a dostatečné podepření zad a dolních končetin vhodnými polohovacími pomůckami.

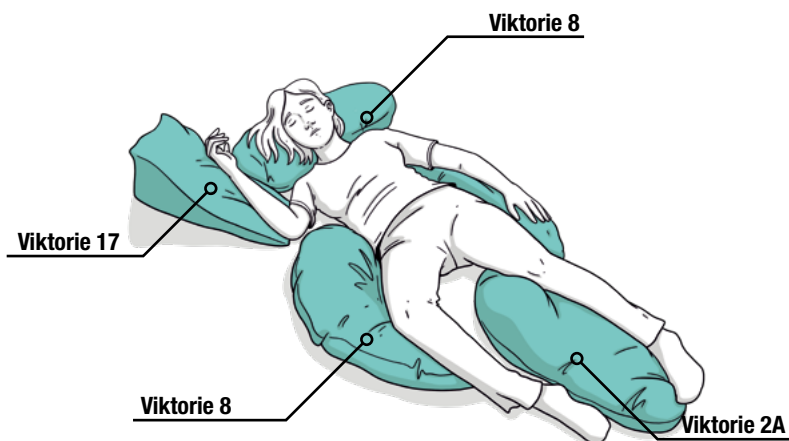

Fowlerova poloha

Poloha kterou klienti dlouhodobě upoutaní na lůžko velmi rádi uvítají jako změnu polohy vleže. Poloha využívaná při jídle, hygieně a sociálním kontaktu. Vhodná také u klientů s onemocněním dýchacích cest. Jako u všech poloh dbáme na správné uložení s využitím polohovacích pomůcek, tak aby klient měl pocit stability a komfortu.

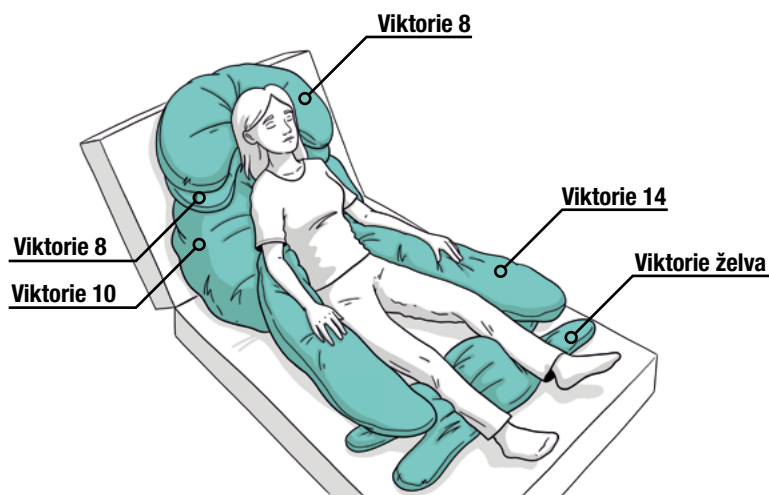


Profesionální polohovací pomůcky

Základní přehled poloh (2/2)


Poloha supinační (na zádech)

Nejčastější poloha pro uložení klientů v rámci polohování. Jedná se o stabilní polohu s dobrým komunikačním rozhledem. Její nevýhoda spočívá v zatížení velké plochy dorzální strany těla a zhoršené ventilaci plic vlivem gravitace. Správně zvolené polohovací pomůcky tyto nevýhody dokáží omezit. Tato poloha se využívá také jako terapeutická např. po úrazech hlavy nebo punkcích.

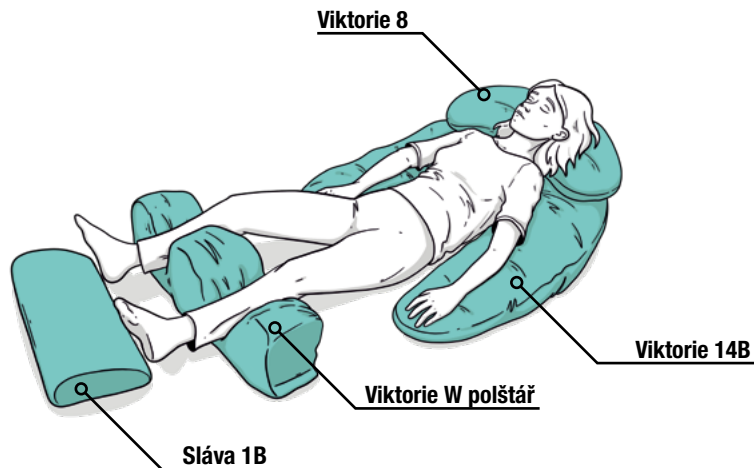






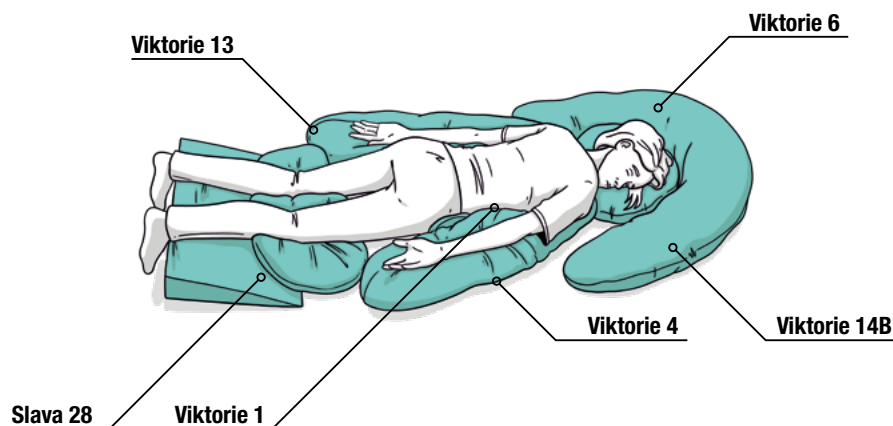

Poloha pronační

Poloha využívaná zejména u pacientů s těžkým onemocněním dýchacích cest ke zlepšení vzdušnosti plicních sklípků na dorzální straně plic. Dochází k výrazné mobilizaci plicního sekretu. V současné době se uvádí, že poloha na břicho je vhodná u každého klienta alespoň jednou za den, pokud k tomu není kontraindikace. Tato poloha je však velmi náročná na správné uložení.

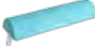

Profesionální polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky Sláva (1/3)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-S1-V		Sláva 1 - Půlválec dlouhý délka 50 cm, průměr 15 cm	2 roky	12%	879 Kč	985 Kč
10-S1A-V		Sláva 1A - Půlválec krátký délka 25 cm, průměr 14 cm	2 roky	12%	798 Kč	894 Kč
210-S1B-V		Sláva 1B - Půlválec velký délka 50 cm, průměr 24 cm	2 roky	12%	1 020 Kč	1 142 Kč
210-S3-V <i>doporučujeme</i>		Sláva 3 - Klín malý 10 x 40 x 35 cm	2 roky	12%	955 Kč	1 070 Kč
210-S4-V		Sláva 4 - Mezinožní klín 10 x 30 x 20 x 50 cm	2 roky	12%	1 348 Kč	1 509 Kč
210-S5-V		Sláva 5 - Klín velký 25 x 30 x 60 cm	2 roky	12%	1 212 Kč	1 357 Kč
210-S6-V		Sláva 6 - Klín zkosený s U profilem 5/20 x 17 x 65 cm	2 roky	12%	1 811 Kč	2 028 Kč
210-S7-V		Sláva 7 - Klínový kvádr s U profilem 20 (v) x 30 (š) x 75 cm	2 roky	12%	2 074 Kč	2 323 Kč
210-S8-V		Sláva 8 - Podpěra pro infuzní terapii 20 x 35 x 10 (v) cm	2 roky	12%	950 Kč	1 064 Kč
210-S11-V		Sláva 11 - Kvádr 20 x 30 x 70 cm	2 roky	12%	1 298 Kč	1 453 Kč
210-S12-V		Sláva 12 - Váleček na procvičení ruky délka 15 cm, průměr 9 cm	2 roky	12%	501 Kč	561 Kč
210-S13-V		Sláva 13 - Válec malý délka 35 cm, průměr 15 cm	2 roky	12%	771 Kč	864 Kč
210-S14-V		Sláva 14 - Válec velký délka 50 cm, průměr 20 cm	2 roky	12%	925 Kč	1 036 Kč
210-S15-V		Sláva 15 - Podložní kolo malé výška 5 cm, vnitř. průměr 6 cm	2 roky	12%	499 Kč	559 Kč
210-S16-V		Sláva 16 - Podložní kolo střední výška 5 cm, vnitř. průměr 12 cm	2 roky	12%	662 Kč	742 Kč
210-S17-V		Sláva 17 - Podložní kolo velké výška 10 cm, vnitř. průměr 20 cm	2 roky	12%	865 Kč	969 Kč

Profesionální polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky Sláva (2/3)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-S18-V		Sláva 18 - Mezinožní podložka 10 x 30 x 35 cm	2 roky	12%	1 253 Kč	1 404 Kč
210-S20-V		Sláva 20 - Polštář tvarovaný anatomický 10 x 29 x 50 cm	2 roky	12%	1 343 Kč	1 504 Kč
210-S20A-V <i>doporučujeme</i>		Sláva 20A - Polštář velký anatomický 10 x 50 x 70 cm	2 roky	12%	2 152 Kč	2 411 Kč
210-S20B-V		Sláva 20B - Polštář tvarovaný anatomický krátký 9 x 30 x 32 cm	2 roky	12%	972 Kč	1 089 Kč
210-S20C-V		Sláva 20C - Polštář tvarovaný anatomický dlouhý 9 x 60 x 32 cm	2 roky	12%	1 514 Kč	1 696 Kč
210-S21-V		Sláva 21 - Podsedák výška 5 cm 36 x 37 x 5 cm	2 roky	12%	966 Kč	1 081 Kč
210-S21A-V		Sláva 21A - Podsedák výška 12 cm 45 x 40 x 12 cm	2 roky	12%	1 065 Kč	1 193 Kč
210-S22-V		Sláva 22 - Podsedák výška 12 cm 45 x 40 x 12 cm	2 roky	12%	1 346 Kč	1 508 Kč
210-S23oc-V		Sláva 23 - Klín 26 x 70 x 15/5 cm (výška)	2 roky	12%	1 211 Kč	1 357 Kč
210-S24-V		Sláva 24 - Podložka 100 x 51 x 4 cm (výška)	2 roky	12%	1 326 Kč	1 485 Kč
210-S24A-V <i>doporučujeme</i>		Sláva 24A - Podložka (pár) 80 x 30 x 5 cm (výška) <small>Při použití vložte podložku do bavlněného potahu, bez něj pomůcka klouže.</small>	2 roky	12%	1 768 Kč	1 980 Kč
210-S25-V		Sláva 25 - Kvádr 37 x 25 x 10 cm	2 roky	12%	606 Kč	679 Kč
210-S26-V		Sláva 26 - Klín 60 x 26 x 80 cm	2 roky	12%	2 059 Kč	2 307 Kč
210-S27-V		Sláva 27 - Klín 35 x 26 x 80 cm	2 roky	12%	1 739 Kč	1 948 Kč
210-S28-V		Sláva 28 - Klín 60 x 17 x 70 cm	2 roky	12%	1 833 Kč	2 052 Kč
210-S29-V		Sláva 29 - Válec střední délka 50 cm, průměr 15 cm	2 roky	12%	903 Kč	1 012 Kč
210-snek-V		Sláva šnek průměr: vnitřní 8 cm / vnější 28 cm	2 roky	12%	1 511 Kč	1 692 Kč












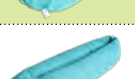



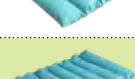
Profesionální polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky Sláva (3/3)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-PP-V		Sláva PP - Podložka pod paty pár	2 roky	12%	1 452 Kč	1 626 Kč
210-SPPA-V		Sláva PPA - Podložka pod paty pár nová	2 roky	12%	1 706 Kč	1 910 Kč
210-SPPB-V		Sláva PPB - Podložka pod paty pár nová dětská	2 roky	12%	1 706 Kč	1 910 Kč
210-PL-V		Sláva PL - Podložka pod lokty pár	2 roky	12%	1 452 Kč	1 626 Kč
210-VK-V		Sláva vertikalizační klín 60 × 50 × 40 cm	2 roky	12%	3 965 Kč	4 441 Kč

Profesionální polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky Viktorie (1/2)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-V10c-V		Viktorie 1 - Půlválec pod hlavu 30 x 70 x 15 cm	2 roky	12%	1 085 Kč	1 215 Kč
210-V20c-V		Viktorie 2 - Hokejka 30 x 130 x 60 cm	2 roky	12%	1 626 Kč	1 821 Kč
210-V2A0c-V <i>doporučujeme</i>		Viktorie 2A - Hokejka dlouhá 30 x 210 x 60 cm	2 roky	12%	2 197 Kč	2 461 Kč
210-V30c-V		Viktorie 3 - Had tenký 20 x 220 cm	2 roky	12%	1 462 Kč	1 637 Kč
210-V40c-V		Viktorie 4 - Bumerang 35 x 200 cm	2 roky	12%	1 826 Kč	2 046 Kč
210-V60c-V		Viktorie 6 - Kruh sedací vnitř. průměr 15 cm	2 roky	12%	910 Kč	1 019 Kč
210-V70c-V		Viktorie 7 - Polštář 40 x 45 cm	2 roky	12%	734 Kč	822 Kč
210-V80c-V <i>doporučujeme</i>		Viktorie 8 - Banán 30 x 70 x 20 cm	2 roky	12%	1 280 Kč	1 434 Kč
210-V100c-V <i>doporučujeme</i>		Viktorie 10 - Sedák - kostka 40 (výška) x 60 x 60 cm	2 roky	12%	2 246 Kč	2 516 Kč
210-V120c-V		Viktorie 12 - Váleček na procvičení ruky délka 15 cm, průměr 9 cm	2 roky	12%	502 Kč	563 Kč
210-V130c-V <i>doporučujeme</i>		Viktorie 13 - Hnízdo 60 x 90 cm	2 roky	12%	1 277 Kč	1 430 Kč
210-V140c-V		Viktorie 14 - Had tlustý 28 x 200 cm	2 roky	12%	1 755 Kč	1 965 Kč
210-V14A0c-V		Viktorie 14A - Podkova na kojení 80 x 80 x 30 cm	2 roky	12%	1 716 Kč	1 922 Kč
210-V14B0c-V		Viktorie 14B - Podkova 80 x 50 x 30 cm	2 roky	12%	1 638 Kč	1 835 Kč
210-V150c-V		Viktorie 15 - Žebrový polštář malý 50 x 58 cm	2 roky	12%	1 474 Kč	1 651 Kč
210-V15A0c-V <i>doporučujeme</i>		Viktorie 15A - Žebrový polštář velký 100 x 60 cm	2 roky	12%	2 209 Kč	2 474 Kč

Profesionální polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky Viktorie (2/2)

Kat. číslo	Obrázek	Výrobek	Záruka	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
210-V17oc-V		Viktorie 17 - Klín pod ruku střední 20 x 45 x 23 cm	2 roky	12%	1 194 Kč	1 338 Kč
210-Vzelvaoc-V doporučujeme		Viktorie Želva 45 x 85 cm	2 roky	12%	1 476 Kč	1 653 Kč
210-VWpolstaroc-V		Viktorie W polštář 25 x 65 x 30 cm	2 roky	12%	1 631 Kč	1 826 Kč
210-Vpodkovaoc-V		Viktorie Podkova 40 x 40 cm	2 roky	12%	1 258 Kč	1 409 Kč
210-Vkonikoc-V		Viktorie Koník 120 x 50 x 25 cm	2 roky	12%	2 718 Kč	3 044 Kč
220-EPS		Viktorie náhradní pytel EPS kuliček objem 50 litrů	2 roky	12%	926 Kč	1 038 Kč
210-SL		Látka Ocean - prodávána na běžné metry (2,2x1m = 1bm)	2 roky	12%	687 Kč	769 Kč


Seminář: Vše o polohování

Akreditované školení

Tento seminář školíme od roku 2022. Hlavním cílem je, aby polohování bylo jednodušší pro vás, ale efektivní pro klienty.

Kurz je akreditovaný u Ministerstva práce a sociálních věcí a je součástí celoživotního vzdělávání.

Vlivem mnoha faktorů přibývá jedinců, kteří jsou plně či částečně upoutáni na lůžko. Pokud chceme, aby tito klienti...

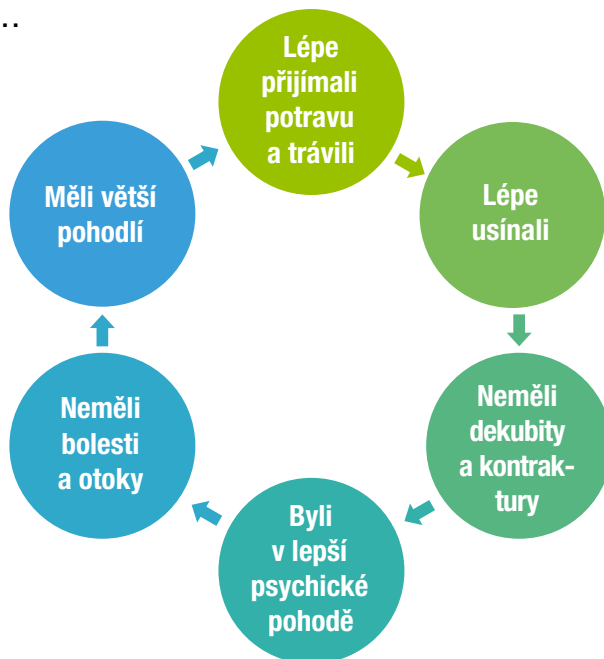

...musíme je umět správně a s jistotou napolohovat nebo jim do takové polohy dopomoci.

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je detailní osvětlení problematiky polohování, definice oblastí, kde je polohování nutné, nácvik základních poloh a praktické osvojení úkonů polohování - ve skupině i samostatně. 30% teorie, 70% praktický nácvik.

- teoretický úvod do polohování, druhy, indikace
- důsledky špatného polohování, nepolohování
- zásady správného polohování
- cíle správného polohování
- polohovací pomůcky
- základní polohy
- praktický nácvik ve skupině i samostatně

Organizace:

- školení probíhá u vás, určeno pro max. 9 účastníků
- pro potřeby nácviku je nutno připravit elektricky polohovatelné lůžko
- ostatní pomůcky jsou zajištěny školitelem
- délka kurzu 6 hodin (9:00 – 15:00)


Obj. kód	Popis	Číslo akreditace MPSV	cena bez DPH	cena vč. DPH
450-polohovani	Seminář: Vše o polohování	A2022/1211-PC/PP/VP	19 500 Kč	23 595 Kč

Prevence a léčba dekubitů

Polohovací pomůcky

Polohování - často opomíjená a vysoce specifická ošetrovatelská dovednost

Polohování není jen pasivní uložení jedince do určité polohy či prevence kožních lézí. Polohování je jedním z nejdůležitějších aspektů v péči o imobilního nebo částečně imobilního jedince. Aby u klienta mohly být saturovány základní biologické potřeby, bez nichž není ani život, musí pečující osoba znát zásady správného polohování. A to nejen v rámci preventivních opatření. Také pro dobrý spánek, psychickou pohodu, pohodlný příjem potravy, správné vyprazdňování, zmírnění bolesti, zlepšení kardiovaskulárních funkcí, lepší uvědomování si vlastního těla. Taktéž terapeutický

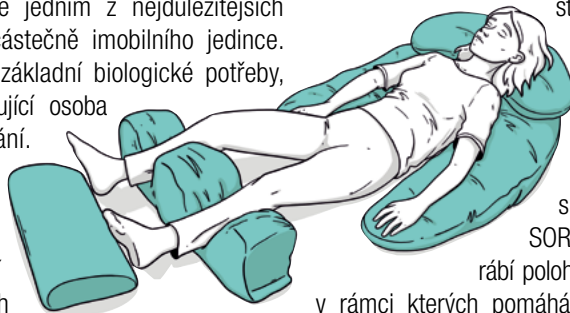

benefit je například v rámci plicních onemocnění zcela nepostradatelný. Je nutností se v této problematice nadále vzdělávat, nacházet lepší techniky a současně kvalitnější pomůcky. Nově získanými vědomostmi můžeme zlepšit kvalitu života klientovi a v neposlední řadě výrazně ušetřit síly ošetrojícímu personálu. Společnost SORAL Medical s.r.o. již 34 let navrhuje a vyrábí polohovací pomůcky a nově poskytuje i školení, v rámci kterých pomáhá poskytovatelům péče pracovat účinněji a efektivněji.



Objednávky pomůcek:

tel.: 251 611 915 | 605 283 516

info@soral.eu | www.dekubity.cz

